



ИМПЛАНТАЦИОННАЯ СИСТЕМА NUVO

ГАЙД ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦИФРОВЫХ БИБЛИОТЕК



Улыбка – это доступно





Имплантаты ConicalFit™ (CF)




Имплантат NUVO™ ConicalFIT™ имеет внутреннее коническое соединение и корневидный дизайн, что обеспечивает максимальную универсальность и простоту лечения при всех типах кости.

Имплантационная система NUVO™ предлагает ассортимент ортопедических компонентов, охватывающий все основные показания к применению.



ИМПЛАНТАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ НАДЕЖНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ПРОВЕРЕННЫМ КОНЦЕПЦИЯМ

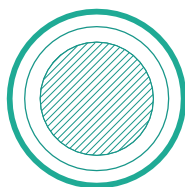


КОНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Nuvo™ ConicalFIT™ обеспечивает надежную фиксацию между абатментом и имплантатом благодаря коническому соединению под углом 22 градуса, а также концепции переключения платформ. Она сочетает в себе антиротационные элементы с индексом, позволяющие правильно расположить абатмент




ЧИСТЫЙ ТИТАН МАРКИ GRADE 4

Имплантаты NUVO™ производят из наиболее чистого и механически прочного медицинского титана 4 грейда (Ti gr4 CP)

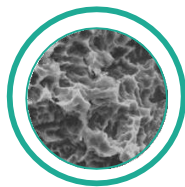

ПОВЕРХНОСТЬ SLA


Поверхность имплантатов NUVO™ подвергается пескоструйной обработке и травлению кислотой по отработанной технологии в ходе строго контролируемого и валидированного процесса

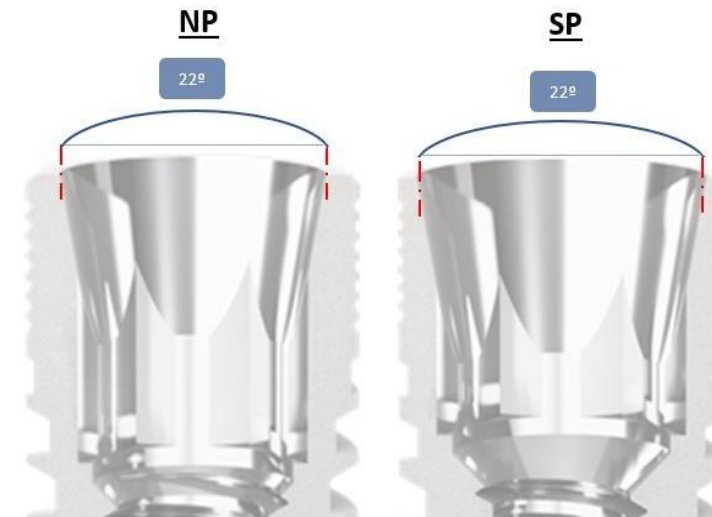


Максимально дружественная имплантационная система NUVO™ ConicalFIT™ предлагает проверенные ортопедические платформы

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ

Соединение типа «конус Морзе» в имплантатах ConicalFIT™ стало еще проще за счёт двух ортопедических платформ, охватывающих все показания, и еще безопаснее, благодаря дифференцированному дизайну внутренней резьбы, позволяющему избежать несоответствия платформы при установке абатмента

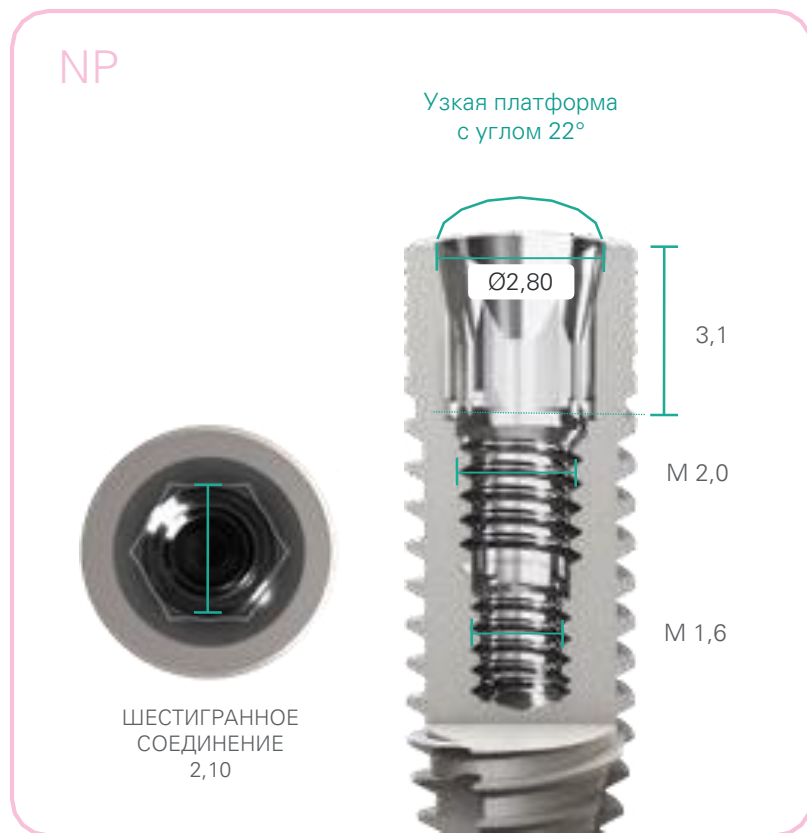

ГДЕ СКАЧАТЬ БИБЛИОТЕКИ?

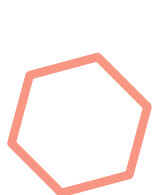

Пройти по [ссылке на сайт](#), далее в фильтрах выбрать нужную библиотеку и скачать

В данном разделе есть удобный фильтр поиска библиотек для Exocad и 3Shape


Фильтр по имплантационным системам

The screenshot shows a web interface with a search bar at the top containing the text "Поиск". To the right of the search bar are filter buttons for "exocad" and "Nuvo", and a link to "Очистить фильтры". Below the search bar, there are several filter categories on the left side, each with a green header and a list of options:

- Компания-партнер**: ☒ exocad (2), ☐ 3Shape (1)
- Страна**: ☐ Глобальный (2)
- Бренд компании**: ☐ Straumann (15), ☐ Medentika (11), ☐ Anthogyr (5), ☐ Neodent (3), ☒ Nuvo (2)
- Зона ортопедической процедуры**: (dropdown arrow)
- Product Reference**: (dropdown arrow)




On the right side of the interface, there are two search results for "exocad - 2.0":

- NUVO local Milling**: 17. июн. 2021, ZIP, 16.8 MB. Download icon.
- NUVO Model Analogs local Printing**: 17. июн. 2021, ZIP, 2.5 MB. Download icon.

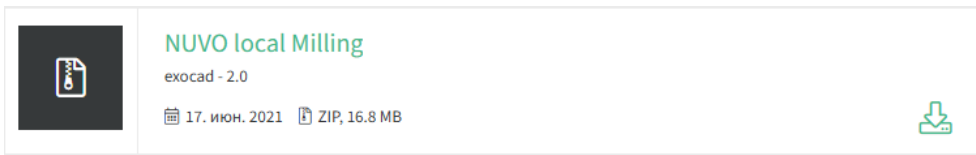

NUVO_Abutment Level_local-milling

Для конструкций на колпачках для мульти-юнитов

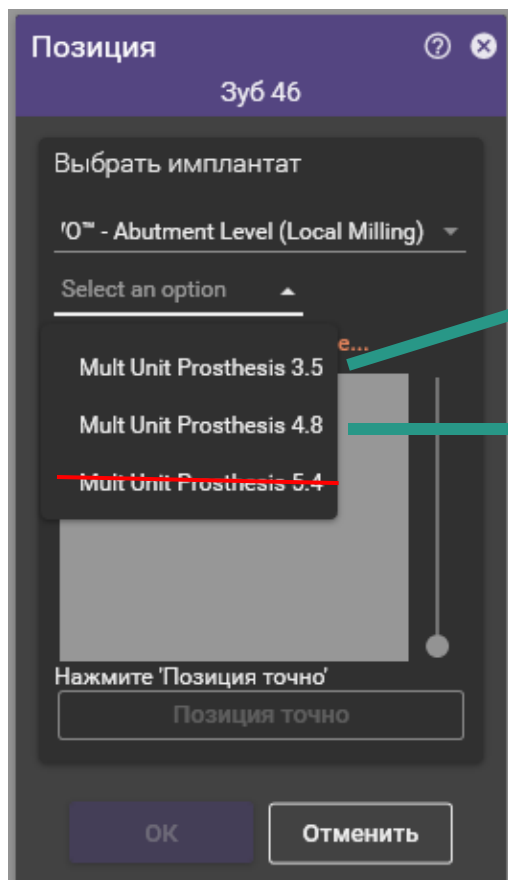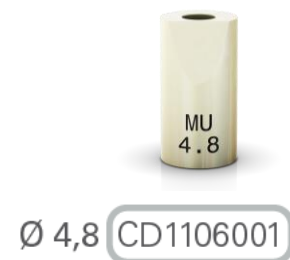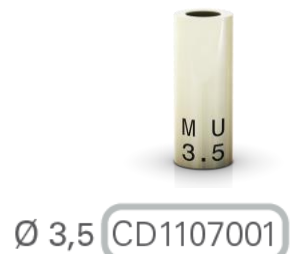

Ø 3.5

CD1807002

CD1614001




Ø 4.8

CD1829002




CD1614001

ВИНТЫ

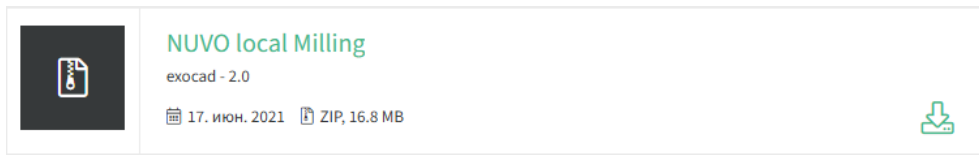

Nuvo_Abutment_Level centralized

Для конструкций с уровня мульти-юнитов (без использования колпачков)

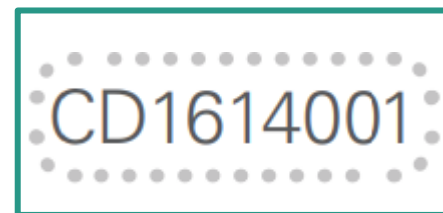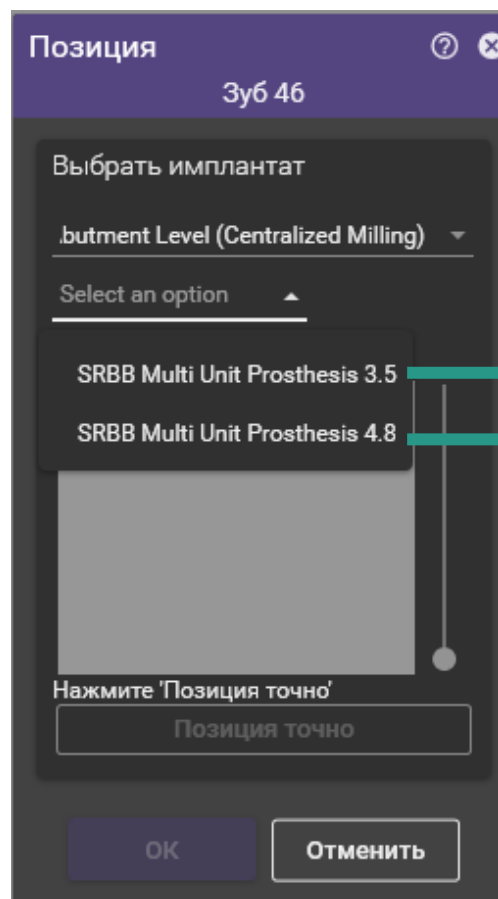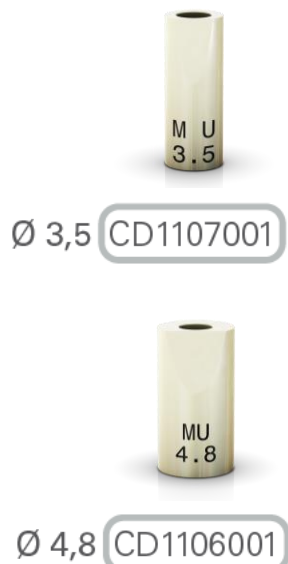

ВИНТ



NUVO local Milling


exocad - 2.0

17. июн. 2021 ZIP, 16.8 MB



NUVO_CF_local-milling_conid

Для конструкций на титановых основаниях и использование премиллов

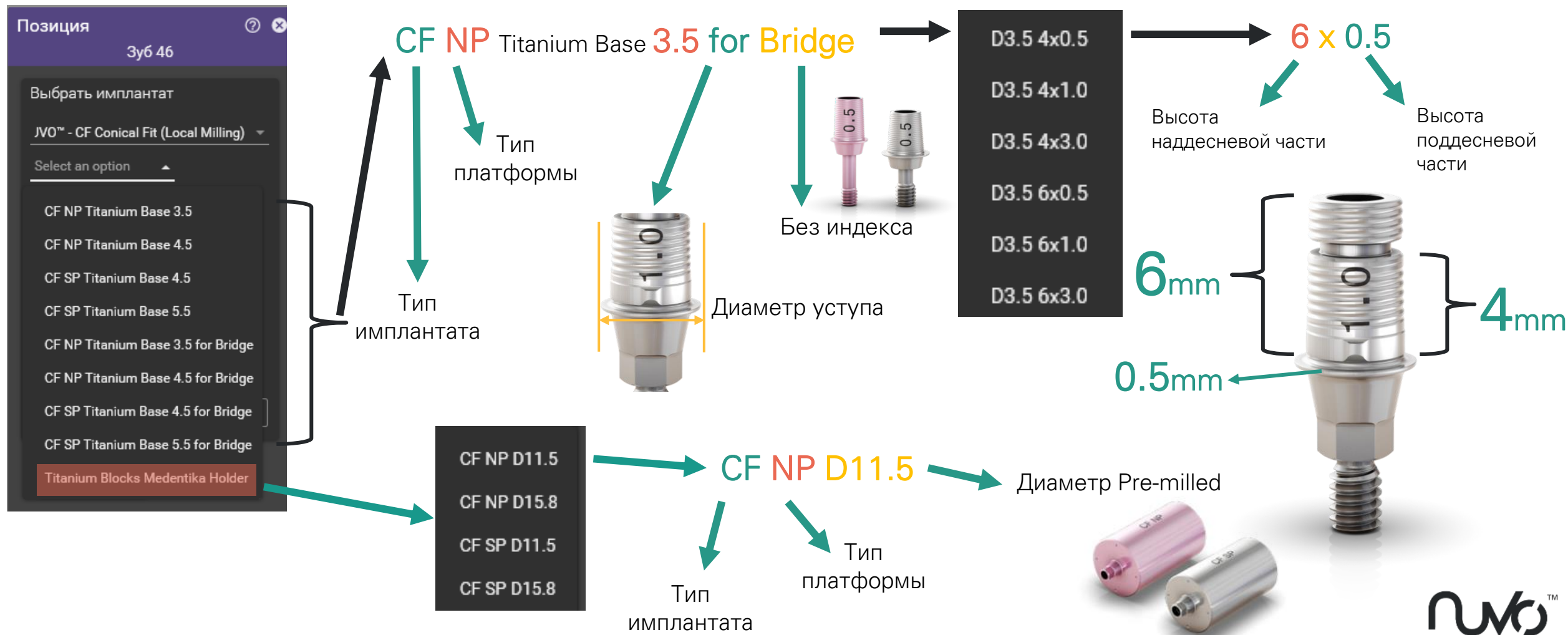



NUVO local Milling

exocad - 2.0

17. июн. 2021 ZIP, 16.8 MB



NUVO_CF_local-milling_conid

Для конструкций на титановых основаниях и использование Pre-milled



Для
коронки

	Высота десны
Ø3,5 (NP)	0,5, 1,0, 3,0 мм
Ø4,5 (NP)	0,5, 1,0, 3,0 мм
Ø4,5 (SP)	0,5, 1,0, 3,0 мм
Ø5,5 (SP)	0,5, 1,0, 3,0 мм

Высота цементирования:

- 6 мм

Возможность регулировки до:

- 4 мм



Для моста

	Высота десны
Ø3,5 (NP)	0,5, 1,0, 3,0 мм
Ø4,5 (NP)	0,5, 1,0, 3,0 мм
Ø4,5 (SP)	0,5, 1,0, 3,0 мм
Ø5,5 (SP)	0,5, 1,0, 3,0 мм

Высота цементирования:

- 4,5 мм

		GH. 0.5	GH. 1.0	GH. 3.0	
NP	Ø 3.5	CD3503001	CD3503002	CD3503003	spare screw NP CD1603001
	Ø 4.5	CD3503007	CD3503008	CD3503009	
SP	Ø 4.5	CD3503013	CD3503014	CD3503015	SP CD1603002
	Ø 5.5	CD3503019	CD3503020	CD3503021	

		GH. 0.5	GH. 1.0	GH. 3.0	
NP	Ø 3.5	CD3503004	CD3503005	CD3503006	spare screw NP CD1603001
	Ø 4.5	CD3503010	CD3503011	CD3503012	
SP	Ø 4.5	CD3503016	CD3503017	CD3503018	SP CD1603002
	Ø 5.5	CD3503022	CD3503023	CD3503024	



	Ø 11.5	Ø 15.8	
NP	CD3703001	CD3703002	NP CD1603001 SP CD1603002
SP	CD3703003	CD3703004	

ВИНТЫ



NUVO Model Analogs local Printing


exocad - 2.0

17. июн. 2021 ZIP, 2.5 MB




NUVO_Analogs_2.0

Цифровые аналоги для принтованных моделей

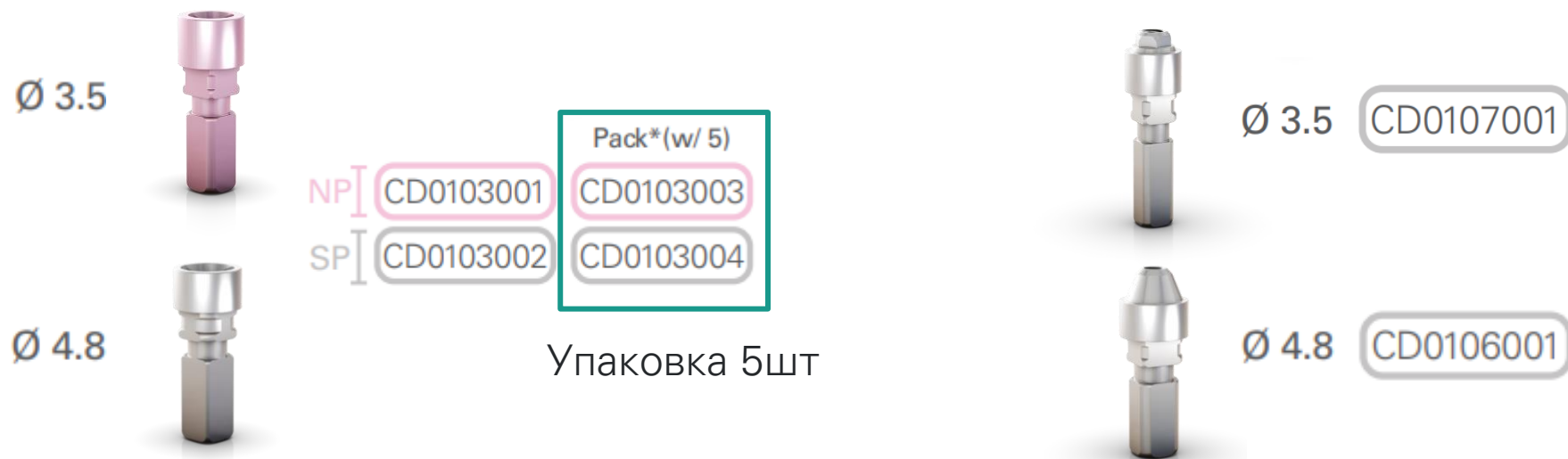

КАК И КУДА УСТАНОВИТЬ БИБЛИОТЕКИ?



После того как скачали архив его необходимо разархивировать

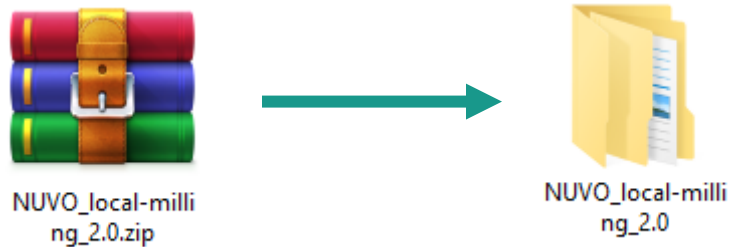


Перед тем как добавлять библиотеки надо убедиться чтобы папки были сразу с файлами, а не папка в папке

НАХОДИМ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ EXOCAD НА ВАШЕМ КОМПЬЮТЕРЕ

Путь для библиотек цифровой протетики

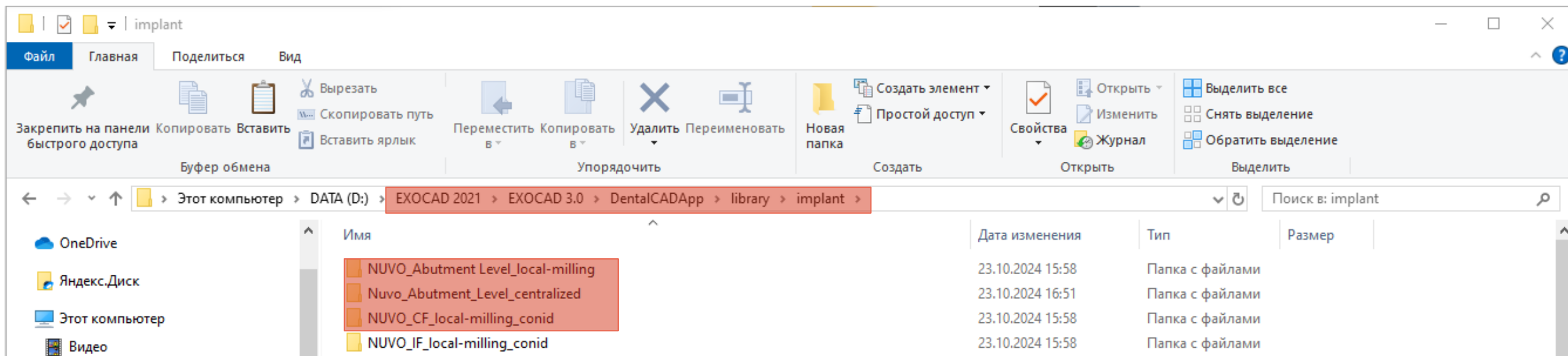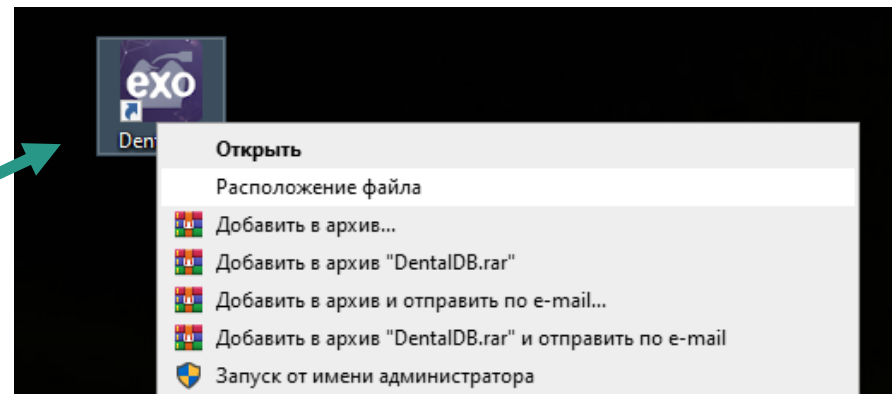

ПУТЬ ДЛЯ БИБЛИОТЕК ЦИФРОВЫХ АНАЛОГОВ

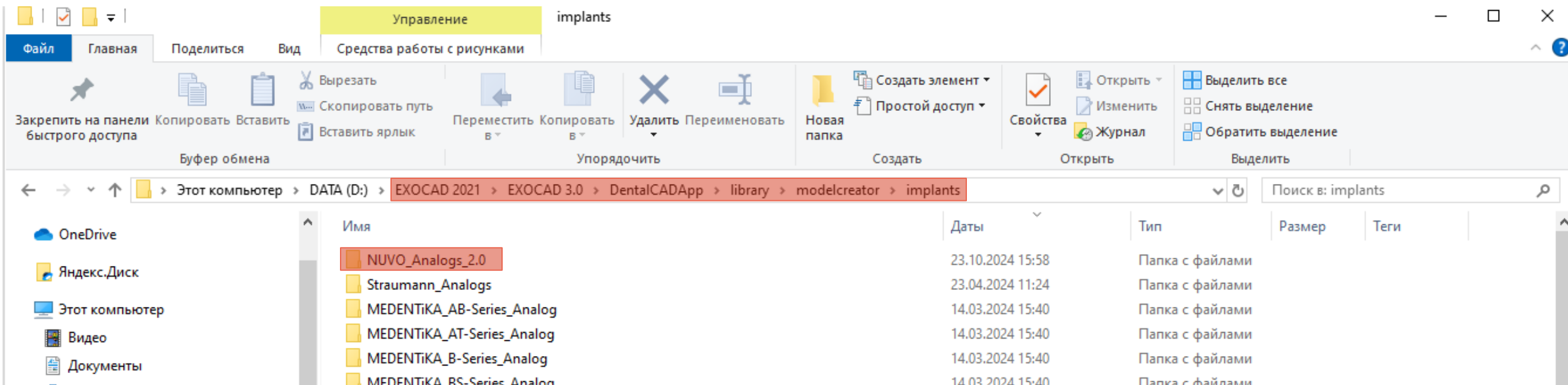


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОПОСТАВЛЕНИЮ СКАН-МАРКЕРА

Использование бегунка позволяет обрезать скан-маркер и использовать для сопоставления только необходимую геометрию

Чтобы проанализировать сопоставление и убедиться в его точности нажмите клавишу Ctrl и нажмите «позиция точно»

Изменение позиции интерфейса

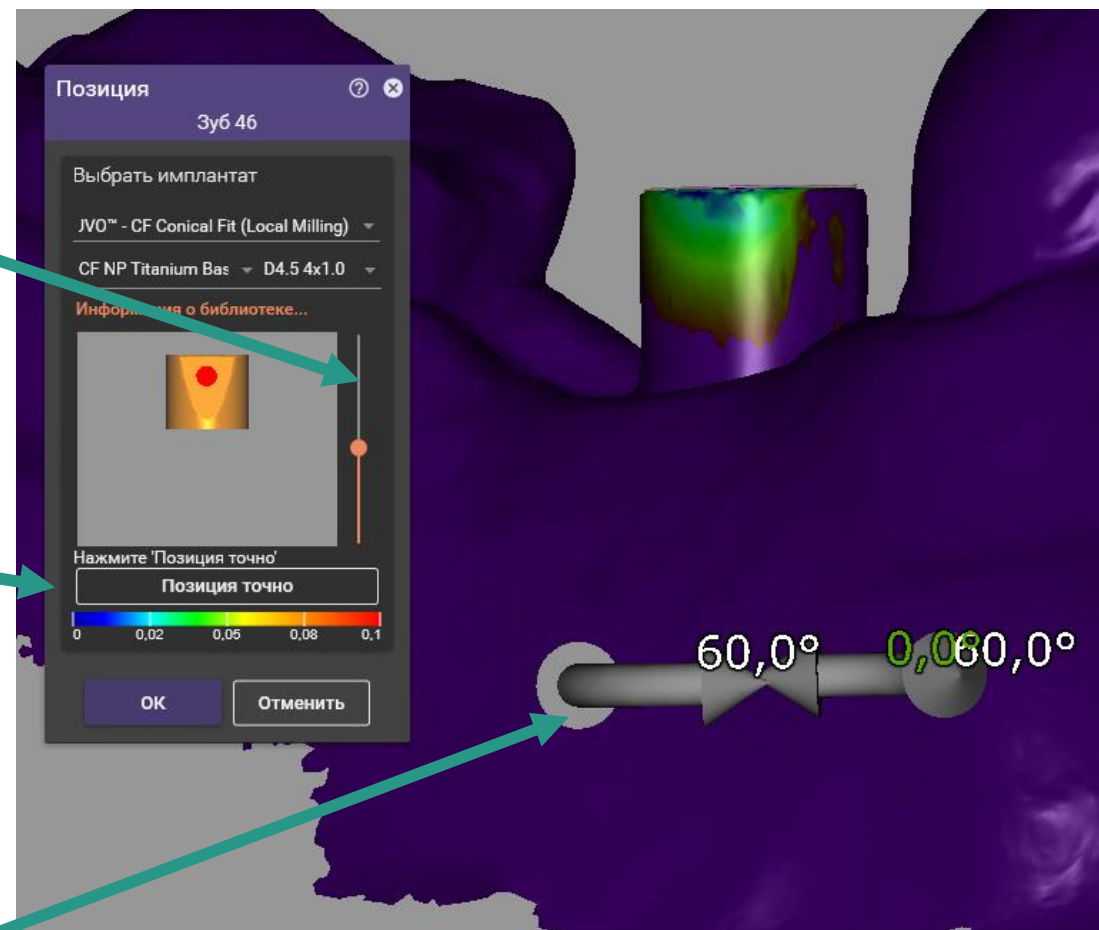



nmo™

Улыбка – это доступно